

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD14DC-P301QX2

Фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із режимом +2...+8 °C. Холодильник серії STANDARD із скляними дверима. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



100 л

корисний об'єм
130 л загального об'єму

+2...+8 °C

температура зберігання

560 × 620 × 870 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Оптична й акустична сигналізація** температурних відхилень.
- **Циркуляція повітря** вентилятором та захист від контакту з холодною поверхнею.
- **Механічний замок** і самозачинення дверей.
- **Автоматичне розморожування** та LED-освітлення.

Параметри експлуатації

Заводська уставка	+5 °C
Умови довкілля	+10...+35 °C; відносна вологість до 75%
Електроживлення	220–240 В; 50 Гц; номінальний струм 0,5 А
Номінальна споживана потужність	90 Вт
Енергоспоживання	0,751 кВт·год / 24 год; 274 кВт·год / рік
Рівень шуму та холодоагент	42 дБ(А); R600a



Snaige Medical MD14DC-P301QX2

Оснащення та розміри

Двері та замок	Скляні двері; механічний замок; самозачинення
Керування та дані	Електронна індикація температури
Сигналізація	Оптична й акустична; захист від низької температури
Безпотенційний контакт тривоги	Немає
Порт зовнішнього датчика	Є; діаметр 12,5 мм
Внутрішнє освітлення	Верхня LED-смуга
Полиці	4: 2 регульовані та 2 нижні
Розміри полиць (Ш × Г)	420 × 324, нижні: 465 × 263 та 445 × 180 мм
Навантаження на полицю	До 20 кг
Матеріали	Зовні — пофарбована сталь; усередині — HIPS-полістирол
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	465 × 392 × 725 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	570 × 640 × 950 мм; без палети
Маса нетто / брутто	37 / 40 кг; брутто без палети

Температурні показники

Коливання / температурний градієнт	0,5 °C / 2,9 °C
Відхилення від уставки	Позитивне +0,5 °C; негативне -1,4 °C
Охолодження +25 → +5 °C	40 хв ¹
Підвищення +5 → +10 °C	40 хв ¹
Відновлення після відкривання	8 хв після відкривання на 1 хв ¹

¹ Дані виробника для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Для відновлення після відкривання зазначено метод EN 60068-3. Час підвищення температури не є підтвердженим строком зберігання препаратів при знеструмленні.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються: металеві перфоровані полиці, додаткова полиця, брендування. Порт не означає, що зовнішній датчик або незалежний реєстратор входить до комплекту.

