

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Vestfrost Solutions VLS 086A RF AC

Комбінований холодильник для вакцин

EMS Level 2

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із режимом +2...+8 °C. Окрема морозильна секція для підготовки холодоелементів. Живлення від електромережі AC. Умови зберігання — за документацією препаратів.



Офіційне фото моделі. Виконання панелі EMS залежить від рівня комплектації.

58 л

об'єм для вакцин
77,0 л холодильна + 50 л морозильна¹

+2...+8 °C

температура зберігання

1190 × 750 × 940 мм

Ш × Г × В; з ручкою

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- Крижана сорочка забезпечує запас холоду.
- Автоматичне керування підтримує режим +2...+8 °C.
- EMS Level 2 — розширений локальний моніторинг.
- Замок і захисний термостат для контрольованого зберігання.

Параметри експлуатації

Температура камери для вакцин	+2...+8 °C
Живлення	220–240 В; 50/60 Гц
Кліматичне виконання	Тропічне; дані для довкілля +43 °C
Утримання температури AC ²	130,17 год за +43 °C
Заморожування холодоелементів ²	2,4 кг / 24 год
Холодоагент	R600a; морозильна секція — R290 + R600a



Vestfrost Solutions VLS 086A RF AC · Level 2

Оснащення та розміри

Керування температурою	Автоматичне
Кришка та доступ	Замок із ключами
Система моніторингу	EMS Level 2
Дисплей і місцева сигналізація	Сенсорний 5"; звукова та візуальна
Доступ до даних	USB; локальне зчитування
Місцева панель і аналіз	Розширена панель і локальний аналіз
Кошики	1 шт.
Захисний термостат	Є
Регульовані опори	Є; 10 см
Комутаційна коробка	Є
Маса нетто / брутто	115 / 140 кг
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	1240 × 785 × 1065 мм
Вбудований стабілізатор	110–278 В для виконання 220–240 В
Морозильна секція	50 л загального об'єму; –15...–25 °С

Холодовий ланцюг та моніторинг

Захист вакцин від замерзання	Клас А за даними виробника
Місткість для холодоелементів	28 × 0,6 л
Заморожування холодоелементів ²	2,4 кг / 24 год
Код WHO PQS	E003/168
Віддалений моніторинг	Опція EMS Level 3; не входить у Level 2

¹ Об'єми двох секцій наведено як загальні; 58 л — корисний об'єм холодильного відсіку. ² Заводські показники за +43 °С. Час утримання наведено для повністю підготовленого приладу за умов заводського випробування.

Додаткове оснащення

Активация EMS Level 3 — дистанційна панель, SMS / e-mail та інтеграція даних. У каталозі є варіанти підписки на 1 або 3 роки; умови підключення погоджують окремо.

