

Вакуумні пробірки з цитратом натрію для дослідження коагуляції



Технологія Vacuette IV - особлива форма стінки пробірки, з потовщеними внутрішніми стінками, що дозволяє істотно збільшити терміни придатності:

1. до 12 міс. - об'єм 2,0 і 2,5 мл
2. до 9 міс. - об'єм 3,5 мл

За рахунок потовщеною стінки пробірки, рівень крові повністю заповненої пробірки знаходиться вище, ніж у пробірці з звичайними стінками



Наповнювач	Розміри пробірок, мм	Обсяги, мл	Кольоровий код
Цитрат Na 3,2%	13x75	2, 2,5, 3,5, 4	
	13x100	5	
Цитрат Na 3,8%	13x75	2, 2,5, 3,5, 4, 4,5	
	13x100	5	

Додаткові характеристики

Наповнювач	: 3,2% або 3,8% буферний розчин цитрату Na
співвідношення крові: антикоагулянт	: 9:1
застосування	: аналіз крові на згортання, коагулограма
центрифугування	: можна відразу
параметри центрифугування	: 2000-2500 г 15 хв. при t 20-25 ° C
зберігання проби до центрифугування	: 4 год при t +2 ... +8 ° C; 2 години при t +18 ... +20 ° C